

¡Sonríe YA!



Manual del Paciente



GENIOVA

THE FAST ALIGNER



RÁPIDO REMOVIBLE ESTÉTICO SIN DOLOR

info@geniova.com • 91 085 17 16 • www.geniova.com

Manual del Paciente

¡Gracias por confiar en Geniova!

Este manual de usuario te servirá de guía para un uso correcto de Geniova The Fast Aligner. Siguiendo las pautas que aquí te indicamos conseguirás el objetivo deseado de una forma rápida, cómoda y estética.

Léelo atentamente y recuerda que tu dentista es el profesional mejor cualificado para resolver cualquier duda. Él siempre te indicará los tiempos y usos correctos según las necesidades de tu tratamiento.

¡Tu sonrisa perfecta está cada vez más cerca!

Colocación de Geniova The Fast Aligner

Alinea las cofias con los dientes comenzando por la zona anterior y ejerce una ligera presión con las yemas de los dedos hasta que notes que ha encajado por completo.



Recuerda que...

- ◆ Antes de colocar Geniova es necesario lavarse las manos con abundante agua y jabón.
- ◆ Debes limpiar Geniova utilizando un cepillo de cerdas suaves con agua fría y sin pasta de dientes, insistiendo en la zona de la ligadura.
- ◆ No utilices agua caliente, enjuague bucal ni limpiadores de prótesis dentales.
- ◆ Si lo deseas, puedes pedir a tu dentista que realice una limpieza específica del aparato en consulta con nuestro kit de limpieza.

Retirada de Geniova The Fast Aligner

Sitúa la punta de los dedos en el borde posterior del aparato y ejerciendo una presión suave por ambos lados retira las cofias posteriores. Seguidamente, libera de la misma manera las cofias anteriores.

En caso de llevar attaches es conveniente liberar primero las cofias de esas piezas.



Recuerda que...

- ◆ Geniova debe ser retirado durante las comidas.
- ◆ Una vez retirado, debes enjuagar inmediatamente el aparato y sacudirlo para retirar el exceso de agua.
- ◆ Cuando no estés utilizando Geniova es aconsejable guardarlo en la caja facilitada en el Patient Kit para un mayor cuidado.

Cuidado diario y recomendaciones

- ◆ Es imprescindible mantener una buena higiene bucodental, por lo que deberás cepillarte los dientes y utilizar seda dental después de cada comida.
- ◆ El tiempo de uso diario del aparato variará dependiendo de las necesidades del tratamiento y siempre será indicado por el odontólogo/ortodoncista al inicio del tratamiento. No obstante, se recomienda un uso de 16 a 18 horas diarias.
- ◆ Se recomienda no estar más de 2-3 horas seguidas sin el aparato colocado en la boca.
- ◆ No es recomendable exponer a fuentes de calor o altas temperaturas. Ten especial cuidado con las bebidas calientes y que puedan teñir el material (café, té, bebidas carbonatadas y gaseosas).



Preguntas frecuentes

¿Geniova puede retirarse durante el tratamiento?

Geniova se retira para comer y beber, por lo que en general no existe ninguna restricción con respecto a la comida, salvo indicación de tu dentista.

¿Puedo masticar chicle mientras llevo puesto Geniova?

No. El chicle se puede quedar pegado por lo que en este caso debes quitarte el aparato.

¿Me van a doler los dientes?

Durante los primeros días al iniciar una nueva fase de tratamiento con Geniova es normal que notes presión en los dientes. Esta sensación suele desaparecer en los días siguientes.

¿Podré hablar bien?

Sí, sólo necesitarás al comienzo del tratamiento un pequeño periodo de adaptación debido al hecho de tener algo nuevo en la boca.

¿Puedo fumar mientras utilizo Geniova?

No es aconsejable ya que el material puede teñirse y afectar a la estética del aparato.

¿Qué hago si pierdo o se rompe mi aparato?

En el caso de que tu aparato se haya perdido o haya sufrido alguna fractura, deberás informar inmediatamente a tu dentista.

¿Por qué en algunos de mis dientes se han colocado attaches?

En ocasiones, para realizar movimientos más complejos se deben colocar attaches en los dientes que aumenten la retención de las cofias y así facilitar el alineamiento dentario.

¿Qué ocurre si algún atache se pierde o se rompe?

En este caso, deberás informar inmediatamente a tu dentista.

¿Puedo tomar bebidas frías o calientes mientras llevo Geniova?

Se recomienda no beber bebidas calientes ya que se puede deformar el material.

Nota: Si tienes alguna duda después de leer este documento informativo, consulta a tu dentista.

Advertencia: En raras ocasiones, es posible que algunos pacientes puedan presentar reacciones alérgicas a alguno de los componentes de Geniova. De igual forma, puede que alguna de las partes o aditamentos del aparato se rompa, con el consiguiente riesgo de ser accidentalmente aspirado o ingerido. En estos casos, se debe interrumpir su uso y consultar inmediatamente con el médico.